


FICHA TÉCNICA

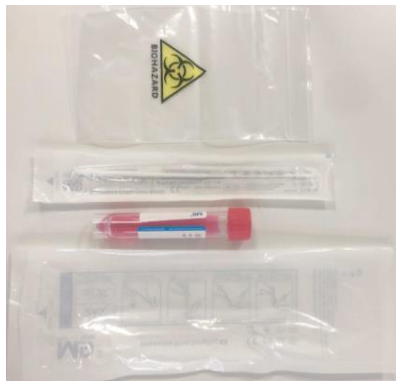

PRODUCTO	Kit Muestreo Virus Desechable (Tipo No Inactivador)
CLASIFICACIÓN	Clase A IVDR
REFERENCIA	MDK-96-FMH-10 (95)-3-T
MODELO	MVTM-10A

DESCRIPCIÓN

Kit hisopo para toma de muestras nasofaríngeas con medio de transporte sin solución inactivadora para virus. Hisopo de nylon, flocado, con punto de rotura, libre de látex y estéril.

Este producto se utiliza ampliamente en centros sanitarios, institutos de investigación, laboratorios clínicos y otros, para recolección, transporte y almacenamiento de muestras nasofaríngeas, ya que permite la conservación del ácido nucleico viral durante 3 días a temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS

CONTENIDO	1 Hisopo Nasofaríngeo 1 Bolsa de Bioseguridad 1 Tubo con Medio Transporte Viral (Tipo No Inactivador)
TIPO	Estéril, Desechable
VOLUMEN DEL MEDIO (LÍQUIDO CONSERVANTE SIN INACTIVADOR)	3ml líquido en tubo de 10ml
COMPONENTES DEL MEDIO	Tris-Hcl, Sacarosa, Cloruro de sodio, Anfotericina B, Violeta cristal, Rojo fenol, Ácido glutámico
TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN	5°C-25°C
CADUCIDAD	24 meses

INSTRUCCIONES DE USO

Verificar el paquete antes de usarlo. Si está dañado, está estrictamente prohibido su uso. Solo se permite tocar el hisopo máximo hasta el punto de rotura.

Recoger la muestra con el hisopo nasofaríngeo:

- Insertar suavemente la cabeza del hisopo hasta la superficie de la nasofaringe, girarlo lentamente 3-4 veces y retirarlo de la cavidad nasal.
- Insertar el cabezal del hisopo con la muestra recolectada en el tubo con la solución.
- Romper el hisopo por el punto de rotura de la varilla, dejar el cabezal en el tubo de muestra y desechar la cola.
- Apretar la tapa del tubo, etiquetar, guardar en la bolsa de bioseguridad y enviar al laboratorio.