

**PRODUCTO**Prueba Rápida de *Campylobacter* en Casete**CLASIFICACIÓN**

IVD - Otros

**REF. IMPORTADOR**

KD050AT-10

**REF. FABRICANTE**

ICAM-602

**CUMPLE NORMATIVA**

IVDD 98/79/EC

**DESCRIPCIÓN**

La Prueba Rápida de *Campylobacter* en Casete detecta de manera rápida y cualitativa la presencia de antígeno de *Campylobacter* en muestras fecales humanas, usando la técnica de inmunoensayo cromatográfico con membrana de oro coloidal.

Si la muestra contiene antígeno de *Campylobacter* se formará una línea roja en la línea de detección (línea T). Asimismo, el test incluye un control interno (línea C) para verificar que el proceso y funcionamiento es correcto.

La infección por *Campylobacter* es una de las causas más comunes de diarrea infecciosa, y la Prueba Rápida de *Campylobacter* en Casete provee un método de detección rápido y preciso, que permite agilizar la detección y mejorar el rendimiento de estudios epidemiológicos y el seguimiento de los brotes.

**CARACTERÍSTICAS****CONTENIDO DEL KIT**

10 Casetes de prueba, 1 prospecto, 10 tubos de recolección de muestras con tampón de extracción, 10 cuentagotas

**TIEMPO DE LECTURA VISUAL DEL RESULTADO**

Leer los resultados a los 10 minutos, no leas los resultados después de 20 minutos.

**CADUCIDAD**

24 meses desde la fecha de fabricación

**PRESENTACIÓN**

10 test/Kit

**SENSIBILIDAD**

95,2%

**ESPECIFICIDAD**

93,5%

**NORMATIVA**

Real Decreto 1662/2000; RD 1591/2009; Directiva 98/79/CE; ISO 13485

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

1. Lea atentamente el manual antes de utilizarlo y realice las pruebas siguiendo estrictamente los requisitos del manual.
2. No utilice el producto si el envase está dañado.
3. Después de terminar la prueba, las tarjetas de prueba usadas, etc. deben eliminarse como residuos médicos.