



<b>PRODUCTO</b>	Prueba Rápida de Embarazo de Tira (Suero o Plasma o Orina)
<b>CLASIFICACIÓN</b>	IVD (Otros)
<b>REF.IMPORTADOR</b>	KD040AT-50
<b>REF.FABRICANTE</b>	FHC-U201

## DESCRIPCIÓN

La Prueba Rápida de Embarazo de Tira (Suero o Plasma o Orina) es un test con marcado CE, basado en el inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral y diseñado para la detección cualitativa rápida de gonadotropina coriónica humana (HCG) en muestras de Suero/Plasma/Orina de humano. Con una alta sensibilidad contra HCG (hasta 10mIU/ml). Sólo para uso profesional de diagnóstico in vitro.

Las muestras positivas reaccionan con el conjugado de color anticuerpo específico de HCG para formar una línea de color en la zona de la prueba de la membrana. La ausencia de esta línea de color sugiere un resultado negativo.

El producto consiste en un método no invasivo, fácil de usar, práctico, rápido.

## CARACTERÍSTICAS

<b>CONTENIDO DEL KIT</b>	Instrucción de uso (1 ud./Kit); Tira reactiva con desecante en envase individual (50 uds./Kit)*; <i>*El envase individual de las placas figurará el mismo número de lote de fabricación y caducidad como la caja</i>
<b>TIEMPO DE DETECCIÓN</b>	5 minutos
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Almacenamiento a temperatura ambiente (2°C a 30°C) dentro de su embalaje original sellado. No congelar.
<b>VIDA ÚTIL</b>	24 meses desde la fecha de fabricación
<b>CANTIDAD</b>	50 tests/Kit
<b>LÍMITE DE DETECCIÓN</b>	10mIU/ml
<b>ESPECIFICIDAD</b>	> 99.9%
<b>SENSIBILIDAD</b>	> 99,9%
<b>NORMATIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Real Decreto 1662/2000</li> <li>• RD 1591/2009</li> <li>• Directiva 98/79/CE</li> <li>• ISO 13485</li> </ul>

## ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones antes de usar. Deben seguirse cuidadosamente las instrucciones proporcionadas.
- No usar el producto con un paquete individual roto, dañado, no sellado completamente, con marcas poco claras o con fecha de caducidad vencida.