



<b>PRODUCTO</b>	Prueba Rápida de Legionella Pneumophila (Orina)
<b>CLASIFICACIÓN</b>	IVD (Otros)
<b>REF.IMPORTADOR</b>	I LEG-102
<b>REF.FABRICANTE</b>	KD025AT-25

## DESCRIPCIÓN

### Prueba Rápida de Legionella Pneumophila (Orina)

La prueba rápida de Legionella Pneumophila en casete (Orina) es un test con marcado CE, basado en el inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral y diseñado para la detección cualitativa rápida del antígeno de legionella pneumophila serogrupo 1 en muestras de orina humana. Solo para uso profesional de diagnóstico in vitro.

El casete de prueba se basa en la tecnología de inmunoanálisis y la reacción antígeno-anticuerpo específica, así, al contener los antígenos frente al Legionella Pneumophila da lugar a la línea roja visible. El producto consiste en un método no invasivo, fácil de usar, práctico, rápido.

## CARACTERÍSTICAS

<b>CONTENIDO DEL KIT</b>	Instrucción de uso (1 ud./Kit); Placa reactiva con desecante en envase individual (25 uds./Kit)*; Goteros (25 uds./Kit); <i>*El envase individual de las placas figurará el mismo número de lote de fabricación y caducidad como la caja</i>
<b>TIEMPO DE DETECCIÓN</b>	15 minutos
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Almacenamiento a temperatura ambiente (2°C a 30°C) dentro de su embalaje original sellado. No congelar.
<b>VIDA ÚTIL</b>	24 meses desde la fecha de fabricación
<b>CANTIDAD</b>	25 test/Kit
<b>ESPECIFICIDAD</b>	> 99.9%
<b>SENSIBILIDAD</b>	97.60%
<b>NORMATIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Real Decreto 1662/2000</li> <li>• RD 1591/2009</li> <li>• Directiva 98/79/CE</li> <li>• ISO 13485</li> </ul>

## ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones antes de usar. Deben seguirse cuidadosamente las instrucciones proporcionadas.
- No usar el producto con un paquete individual roto, dañado, no sellado completamente, con marcas poco claras o con fecha de caducidad vencida.