

**PRODUCTO**

Prueba de embarazo de HCG en Casete

CLASIFICACIÓN

IVD – Otros

REF. IMPORTADOR

KD061DP-25

REF. FABRICANTE

HCG USP

CUMPLE NORMATIVA

IVDD 98/79/EC

DESCRIPCIÓN

La Prueba de embarazo de HCG en Casete detecta de manera rápida y cualitativa la presencia de niveles elevados de HCG (Gonadotropina Coriónica humana) en muestras de orina, suero o plasma, usando la técnica de inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral.

Si la muestra contiene HCG y supera el límite de detección, se formará una línea de color en la línea de detección (línea T). Asimismo, el test incluye un control interno (línea C) para verificar que el proceso y funcionamiento es correcto.

La prueba de embarazo HCG se utiliza en todos los niveles de las instituciones médicas para el diagnóstico precoz de pacientes con embarazo temprano. La Prueba de embarazo de HCG en Casete provee un método de detección rápido y preciso.

CARACTERÍSTICAS

CONTENIDO DEL KIT	25 Casetes de prueba de embarazo HCG, 25 Cuentagotas.
TIEMPO DE LECTURA VISUAL DEL RESULTADO	Leer los resultados a los 3 minutos, no leas los resultados después de 5 minutos.
CADUCIDAD	24 meses desde la fecha de fabricación.
PRESENTACIÓN	25 test/Kit.
SENSIBILIDAD	100%
ESPECIFICIDAD	100%
LÍMITE DE DETECCIÓN	25 mUI / ml
NORMATIVA	Real Decreto 1662/2000; RD 1591/2009; Directiva 98/79/CE; ISO 13485

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. Lea atentamente el manual antes de utilizarlo y realice las pruebas siguiendo estrictamente los requisitos del manual.
2. No utilice el producto si el envase está dañado.
3. Después de terminar la prueba, las tarjetas de prueba usadas, etc. deben eliminarse como residuos médicos.