


# FICHATÉCNICA

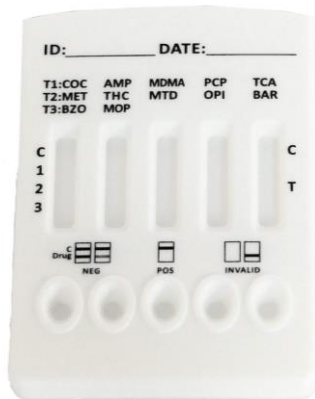

<b>PRODUCTO</b>	<b>Test Rápido de Multidrogas 12 Drogas en Casete (Orina)</b> COC/MET/BZO/AMP/THC/MOP/MDMA/MTD/PCP/OPI/TCA/BAR
<b>CLASIFICACIÓN</b>	IVD (Otros)
<b>REF.IMPORTADOR</b>	DOA-1125
<b>REF.FABRICANTE</b>	KDD002AT-25

## DESCRIPCIÓN

Test Rápido de Multidrogas 12 Drogas en Casete (Orina) es un test con marcado CE; basado en el inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral y diseñado para la detección simultánea de multi-drogas y sus metabolitos en orina humana. Inmunoensayo sólo para diagnóstico in vitro y utilizado por profesionales de la salud.

Gracias a su diseño; el test se puede detectar los tipos de droga y su límite de detección son como:

Nombre de droga	Límite de Detección ng/ml	Nombre de droga	Límite de Detección ng/ml
Cocaine (COC)	300	Metilendioximetanfetamina (MDMA)	500
Metanfetamina (MET)	1000	Metadona (MTD)	300
Benzodiazepinas (BZO)	300	Fenciclidina (PCP)	25
Anfetamina (AMP)	1000	Opiáceas(OPI)	2000
MARIHUANA (THC)	50	Antidepresivos tricíclicos (TCA)	1000
Morfina (MOP)	300	Barbitúricos (BAR)	300

## CARACTERÍSTICAS

<b>CONTENIDO DEL KIT</b>	Instrucción de uso (1 ud./Kit); Placa reactiva con desecante en envase individual (25 uds./Kit)*; Goteros (25 uds./Kit); <i>*El envase individual de las placas figurará el mismo número de lote de fabricación y caducidad como la caja</i>
<b>TIEMPO DE DETECCIÓN</b>	5 minutos
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Almacenamiento a temperatura ambiente (20°C a 30°C) dentro de su embalaje original sellado. No congelar.
<b>VIDA ÚTIL</b>	24 meses desde la fecha de fabricación
<b>CANTIDAD</b>	25 test/Kit
<b>ESPECIFICIDAD</b>	COC: 98,2%; MET: 97,1%; BZO: 99,2%; AMP: 97,9%; THC: 98,1%; MOP: 96%; MDMA: 99,3%; MTD: 98,8%; PCP: 96,8%; OPI: 93,8%; TCA: 91,6%; BAR: 98,6%;
<b>SENSIBILIDAD</b>	COC: 97,8%; MET: 96,2%; BZO: 98,4%; AMP: 98,1%; THC: 97,9%; MOP: 95%; MDMA: 98,1%; MTD: 98,9%; PCP: 92,4%; OPI: 96,7%; TCA: 94,8%; BAR: 96,1%;
<b>NORMATIVA</b>	• Real Decreto 1662/2000 • RD 1591/2009 • Directiva 98/79/CE • ISO 13485

## ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones antes de usar. Deben seguirse cuidadosamente las instrucciones proporcionadas.
- No usar el producto con un paquete individual roto; dañado; no sellado completamente; con marcas poco claras o con fecha de caducidad vencida.